

Gebruikshandleiding De Rollz Motion





Rollz International BV – Rollz Motion


© Copyright 2012 Rollz ® International BV

Informatie in dit document kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Rollz ® International BV is niet aansprakelijk te stellen voor technische fouten of onvolkomenheden.

Het aangeschafte product kan verschillen van het product zoals het beschreven is in de gebruiksaanwijzing. De meest actuele gebruiksaanwijzingen kunnen worden aangevraagd bij Rollz International BV of op www.rollz.com.

CE-conformiteit

Dit product voldoet aan de eisen van EU-richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen. Op basis van de classificatieregels in Bijlage IX bij deze richtlijn wordt het product ingedeeld in klasse 1. Deze verklaring van conformiteit is uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van Rollz International BV, gebaseerd op Bijlage VII bij deze richtlijn.

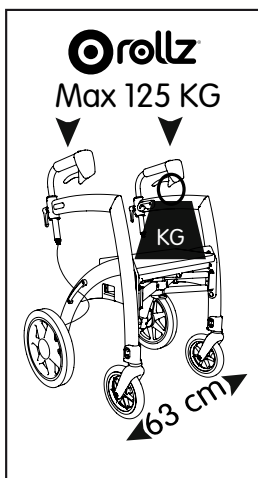



Inhoud

Voor u begint	4
Belangrijke informatie	4
Veiligheid	4
Waarschuwing	5
Indicatie	5
Contra-indicatie	5
Controleer of u alles heeft ontvangen	5
Hergebruik	6
Gebruik	6
Wat zit waar?	7
Uitklappen & inklappen	8
Afstellen/houding	9
Rembediening	9
Lopen met de Rollz Motion	10
Rusten op de Rollz Motion	10
Drempels en stoepranden	11
Tas	12
Onderhoud	13
Remmen afstellen	13
Schoonmaken/ desinfecteren	14
Vervangen van onderdelen	15
Accessoires	15
Van rollator naar rolstoel	15
Wat zit waar?	16
Bevestigen Rollz rolstoelpakket	17
Uitklappen Rollz rolstoelpakket	18
Rugleuning Rollz rolstoelpakket	20
Inklappen Rollz rolstoelpakket	20
Loskoppelen Rollz rolstoelpakket	20
Technische specificaties	21
Contact	21
Garantie	22



Voor u begint

Gefeliciteerd met uw Rollz Motion. Met deze handleiding wil Rollz International BV u helpen om veilig en optimaal van de Rollz Motion gebruik te maken. Wij verzoeken u uw aankoop te (laten) registreren op www.rollz.com.

Wij wensen u veel plezier met de Rollz Motion.

Belangrijke informatie

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het product gebruikt en berg hem goed op.
- Breng uw veiligheid en dat van anderen rondom u niet in gevaar door verkeerd gebruik van dit product.
- Deze handleiding is geschreven voor de Rollz Motion.
- U vindt het serie- en artikelnummer op de productsticker van uw Rollz Motion. Deze bevindt zich op het zitgedeelte onder het zitkussen.
- Dit product is TÜV gecertificeerd.
- Gebruik bij vervanging of reparatie alleen originele of door Rollz International BV goedgekeurde onderdelen.
- Gebruik alleen originele Rollz accessoires.
- De garantie vervalt wanneer het product wordt beschadigd door overbelasting, verkeerd in- of uitklappen, gebruik van niet door Rollz international goedgekeurde onderdelen of gebruik van niet originele accessoires. U vindt de garantie bepalingen op www.rollz.com.
- De Rollz Motion is gepatenteerd en de merknaam en het model zijn beschermd.
- De Rollz Motion is geschikt voor personen tot 125 kg en voor personen van 1,60 m tot 1,90 m.
- Onderdelen van de Rollz Motion kunnen in de zon iets verkleuren.
- Voorkom blootstelling aan extreme temperaturen.

Veiligheid

- De Rollz Motion is uitsluitend bedoeld om één persoon te ondersteunen/vervoeren.
- Gebruik altijd de juiste positie voor de handgrepen. De juiste posities kunt u vinden in het hoofdstuk afstellen/houding (blz.9).
- Stel de remmen tijdig af om verlies van remkracht te voorkomen.



Waarschuwing

- De Rollz Motion is ontwikkeld om met gemak de verschillende functies te bedienen. Echter, het is van essentieel belang na te gaan of de gebruiker fysiek in staat is alle handelingen zelfstandig uit te voeren of dat de gebruiker ondersteuning door andere personen nodig heeft. Rollz International raadt u dan ook aan om dit regelmatig na te gaan.
- Houd de Rollz Motion uit de buurt van open vuur en andere hittebronnen, zoals elektrische of gaskachels.
- Gebruik de Rollz Motion niet als een onderdeel gebroken, gescheurd of incompleet is.
- Zorg dat alle sluitingen zijn vergrendeld voor gebruik.

Indicatie

De Rollz Motion dient ter ondersteuning bij het lopen voor mensen met verminderde bewegingsmogelijkheden, zowel binnens- als buitenshuis. De zitting kan worden gebruikt om tijdens langere afstanden te rusten. Het Rollz rolstoelpakket biedt de mogelijkheid om te rusten terwijl uw gezelschap verder gaat.

Contra-indicatie

De Rollz Motion is niet geschikt voor mensen met:

- waarnemingsstoornissen
- sterke evenwichtsstoornissen
- zitproblemen

Controleer of u alles heeft ontvangen

De Rollz Motion wordt klaar voor gebruik en verpakt geleverd. Controleer of alle onderdelen geleverd zijn. De Rollz Motion wordt compleet geleverd met:

- 1 tas
- 1 gebruikshandleiding
- 1 zitkussen
- 1 rolstoelpakket
- 2 voetsteunen
- 2 armsteunen

WAARSCHUWING!

Houd plastic verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Kinderen kunnen dit in hun mond stoppen en stikken. Het verpakkingsmateriaal meteen weggoien.



Hergebruik

- De Rollz Motion is geschikt voor hergebruik.
- Let op dat u voor veilig hergebruik de onderhoudsdocumentatie aan de nieuwe gebruiker moet overhandigen.
- Voor u de Rollz Motion aan een ander doorgeeft, moet deze eerst schoongemaakt, ontsmet en technisch nagekeken zijn.

Gebruik

De Rollz Motion wordt compleet voor gebruik afgeleverd. Echter, de Rollz Motion moet voor gebruik afgesteld worden op uw persoonlijke voorkeuren. Neem alle punten in dit hoofdstuk aandachtig door voordat u de Rollz Motion in gebruik neemt. U treft in dit hoofdstuk de volgende punten aan:


- Uitklappen & inklappen
- Afstellen en houding
- Rembediening
- Lopen met de Rollz Motion
- Rusten op de Rollz Motion
- Drempels en stoepranden
- Tas
- Onderhoud
- Accessoires



Wat zit waar?

Figuur 1:


- 01. Handgrepen
- 02. Frame
- 03. Schuim gevulde achterwielen
- 04. Rode knop
- 05. Wendbare voorwielen
- 06. Voorzijde

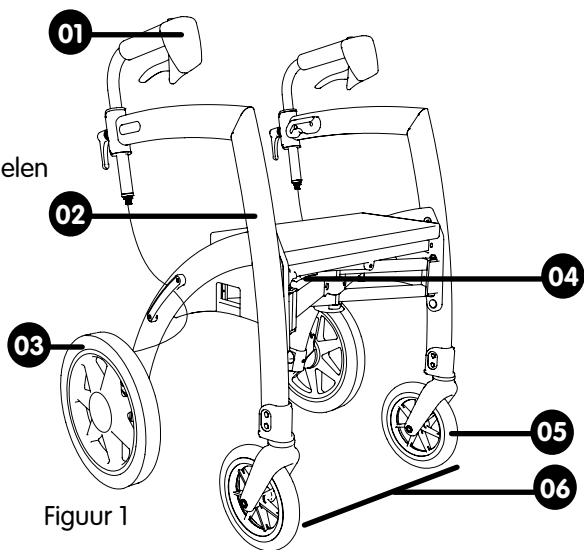

Figuur 1

Figuur 2:

- 07. Handremmen
- 08. Verstelgrepen
- 09. Stelschroeven
- 10. Drempelhulpen
- 11. Parkeerhendels
- 12. Hoogte indexatie
- 13. Zitkussen

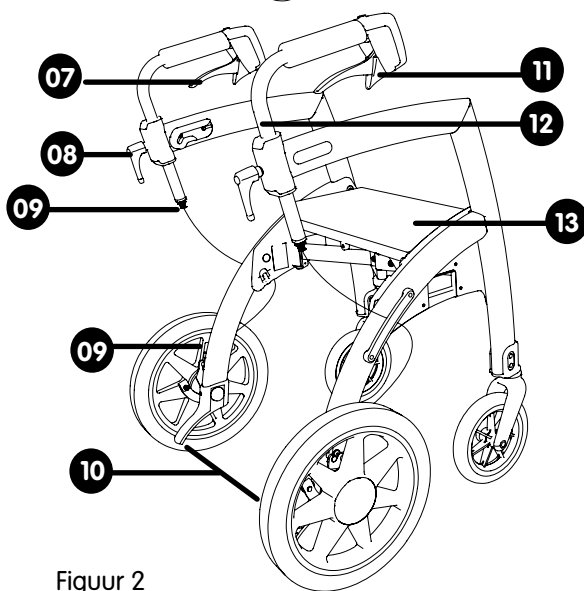

Figuur 2



Uitklappen & inklappen (Fig.3)


Uitklappen Rollz Motion

- Beweeg de zijanten van de Rollz Motion uit elkaar tot deze bijna geheel is uitgeklappt.
- Duw met de hand de zitting naar beneden tot deze vastklikt.

Belangrijk: de zitting zit pas goed vast wanneer u een duidelijke 'klik' hoort.

Inklappen Rollz Motion

- Druk de rode knop in onder de zitting en til de zitting gedeeltelijk omhoog.
- Beweeg de zijanten van de Rollz Motion naar elkaar tot deze is ingeklapt.

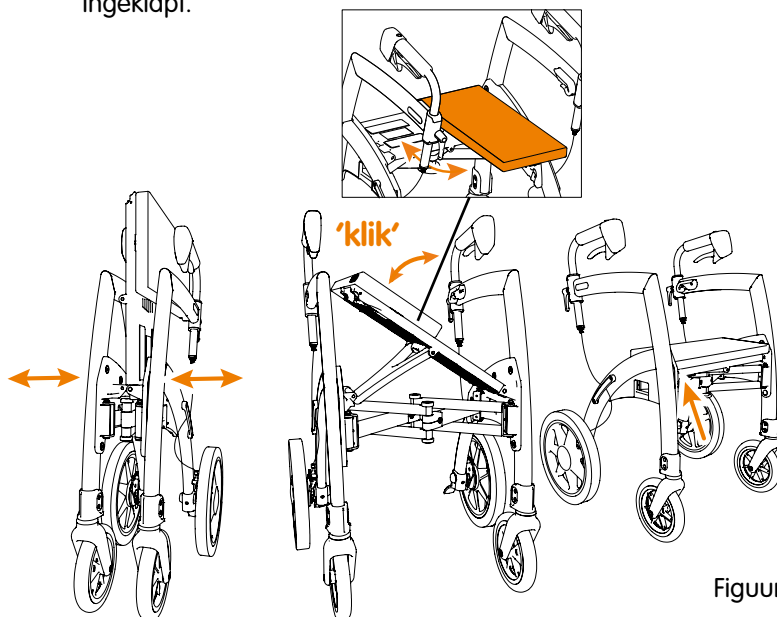

Figuur 3

LET OP: Wanneer u de tas heeft bevestigd, zorg dan dat deze helemaal leeg is voordat u het frame inklapt.


LET OP: Verzekert u ervan dat de zitting is vastgeklikt voordat u de Rollz Motion gaat gebruiken.



Afstellen/houding

Ieder mens is anders en ieder mens heeft andere wensen wanneer hij of zij een product gebruikt. De Rollz Motion past zich moeiteloos aan iedere gebruiker aan. Om optimaal van de Rollz Motion gebruik te maken is de juiste afstelling cruciaal.

- Draai de verstelgrepen van de handgrepen tegen de klok in los en schuif de handgrepen met behulp van de hoogte indexatie op de voor u juiste hoogte.
- Om te bepalen wat de juiste hoogte is, gaat u tussen de handgrepen van de Rollz Motion staan met afhangende armen. De handgrepen behoren ter hoogte van uw polsen te zijn (Fig. 4).
- Verzekert u ervan dat de handgrepen recht boven de zijkant van de Rollz Motion staan en naar de voorkant wijzen.
- Draai de verstelgrepen van de handgrepen met de klok mee vast. Controleer of de handgrepen volledig vast zitten op de juiste positie.

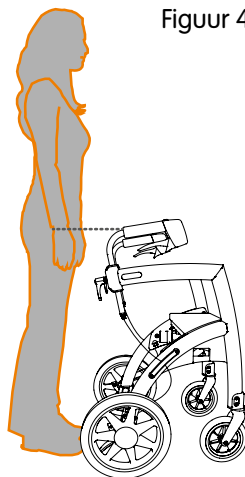


Figuur 4

LET OP: Plaats beide handgrepen altijd op dezelfde hoogte om de stabiliteit te behouden.


Rembediening

De Rollz Motion heeft geavanceerde remmen die gemakkelijk te bedienen zijn. De remmen kunnen gevarieerde remkracht leveren tijdens het rijden. Ook kunt u de remmen blokkeren wanneer u de Rollz Motion parkeert.

- Knijp in de handremmen om de remkracht toe te laten nemen (Fig. 5).
- Knijp de handremmen en de parkeerhendels tegelijk in en laat de remmen vervolgens los om de rem in de parkeerstand te zetten (Fig 6).
- Om de parkeerstand op te heffen dient u de handremmen nogmaals in te knijpen en los te laten.

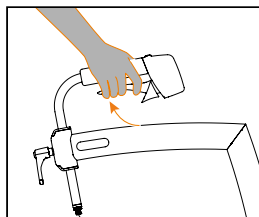

Figuur 5

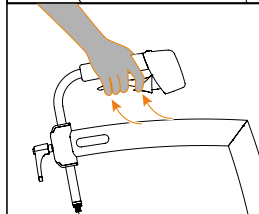

Figuur 6



Lopen met de Rollz Motion


Het ergonomische design van de Rollz Motion laat u rechtop, stabiel en comfortabel lopen. Om hier optimaal gebruik van te maken is het essentieel de voor u juiste afstelling te hanteren.

- a. Zorg dat de handgrepen op de juiste hoogte zijn afgesteld. Zie: Afstellen /houding.
- b. Tijdens het lopen neemt u tussen de handgrepen plaats en steunt u op de Rollz Motion.

Rusten op de Rollz Motion.

De Rollz Motion is ontworpen om personen te ondersteunen tijdens het lopen. Daarnaast is het mogelijk om op de Rollz Motion te zitten wanneer u even wilt pauzeren.

- a. Zet uw Rollz Motion in de parkeerstand. Zie: rembediening.
- b. U kunt op de zitting plaatsnemen. Zorg er altijd voor dat de Rollz Motion op de parkeerstand staat. De Rollz Motion is niet geschikt om mee te lopen terwijl u zit.

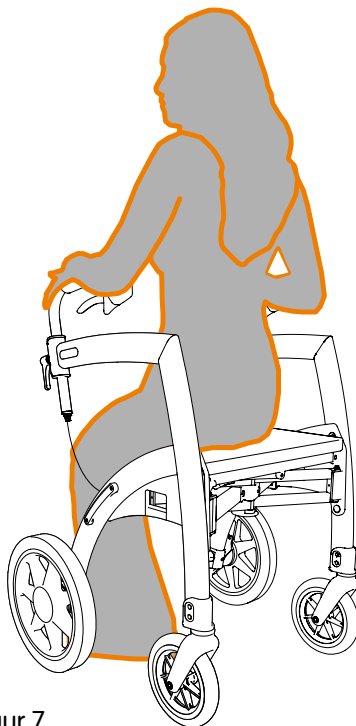


Figuur 7



Drempels en stoepranden

Producten van Rollz zijn bedoeld om het de gebruiker gemakkelijker te maken. Om makkelijk over drempels heen te kunnen heeft de Rollz Motion een drempelhulp.

- a. Zet de Rollz Motion met de voorwielen tegen de drempel of stoeprand aan.
- b. Duw met uw voet de drempelhulp naar beneden, terwijl u met uw handen de Rollz Motion naar achter trekt. De voorwielen zullen nu van de grond komen. Duw nu de Rollz Motion naar voren totdat u met de voorwielen duidelijk over de drempel of stoeprand heen bent (Fig.8).
- c. Laat de voorwielen weer op de grond zakken en duw de achterwielen naar voren tot deze geheel op de stoep of over de drempel staan.

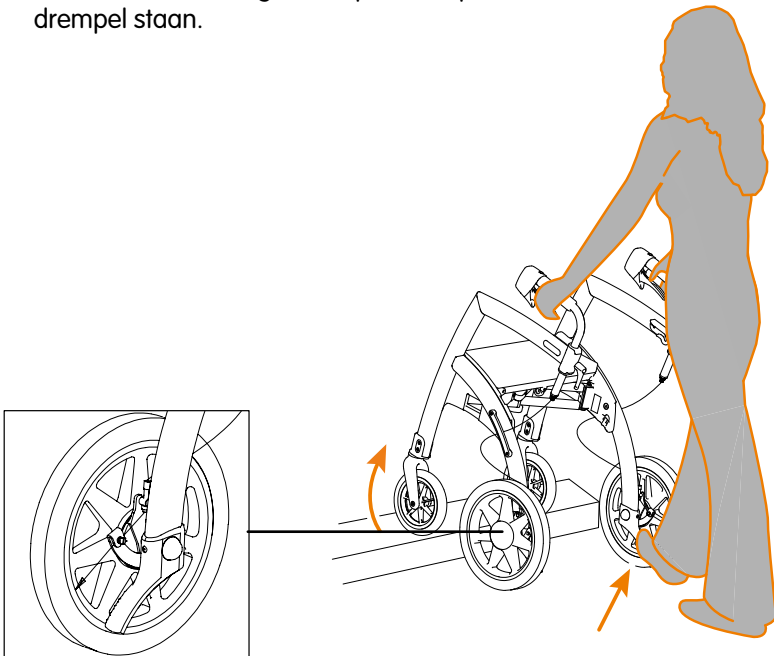

Figuur 8



Tas

Door het gebruik van de tas hoeft u zelf niet te tillen. U kunt de tas gemakkelijk bevestigen en verwijderen.

Tas plaatsen.

- Plaats de tas met de smalle bevestigingslussen richting de achterzijde van de Rollz Motion (Fig.9).
- Bevestig de twee brede bevestigingslussen aan het frame met het klittenband (Fig 10).
- Verbind de smalle bevestigingslussen met de haakjes in het frame (Fig. 10).

Tas gebruiken.


- De tas is bereikbaar vanaf de achterzijde van de Rollz Motion.
- Wanneer u de tas leeg maakt kan deze bevestigd blijven tijdens het opklappen van het frame.

Tas verwijderen.

- Haak de brede bevestigingslussen los van het frame door het klittenband los te trekken.
- Haak de smalle bevestigingslussen los en verwijder de tas.


LET OP: De tas kan een gewicht van maximaal 10 kg dragen. Overbelast de tas niet.

Figuur 10

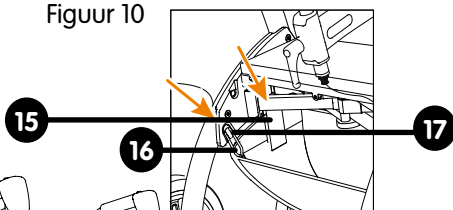

14. Tas
15. Brede bevestigingslus
16. Smalle bevestigingslus
17. Haken

Figuur 9

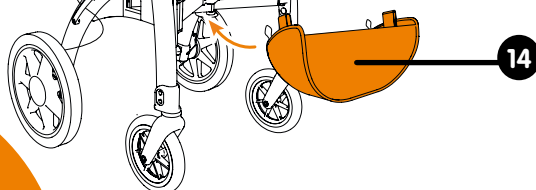



Onderhoud

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur en vergroot de veiligheid van uw Rollz Motion.

Remmen afstellen


Door gebruik kunnen de remmen van de Rollz Motion slijten en kan het nodig zijn om de remmen af te stellen. Door uw remmen juist af te stellen voorkomt u problemen en kunt u optimaal gebruikmaken van de functionaliteit. U kunt dit op twee manieren doen:

1. Remafstelling onder (figuur 11)

- Wanneer u de handremmen volledig inknijpt behoort de Rollz Motion volledig te blokkeren. Wanneer u de handremmen los laat behoort de Rollz Motion volledig vrij te rijden.
- Door de stelschroef te draaien kunt u de remmen afstellen zodat u de bovenstaande eigenschappen kunt verkrijgen.

2. Remafstelling boven (figuur 12)

- Draai de borging los. Hierdoor heeft u de ruimte om de stelschroef boven vaster of losser te draaien.
- Wanneer de remmen de gewenste kracht leveren kunt u de borgschroef weer omhoog/vast draaien.

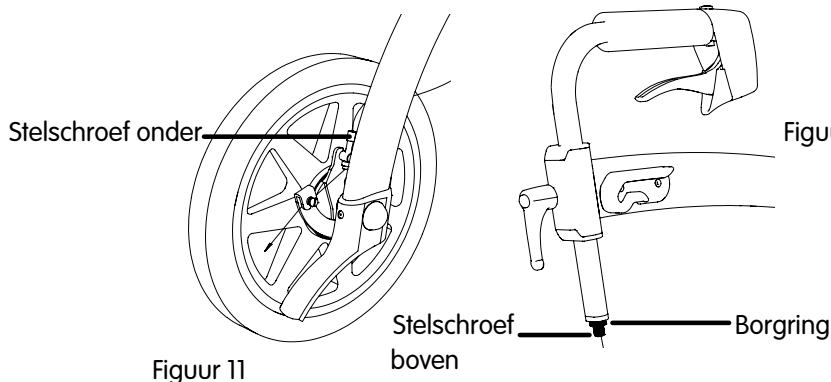

LET OP: Als de remmen na uitvoering van bovenstaande stappen niet naar behoren functioneren, neem dan direct contact op met uw leverancier en gebruik de Rollz Motion niet.



Schoonmaken/ontsmetten

Om de Rollz Motion in optimale staat te houden, is frequent schoonmaken aan te raden. Bij overdracht aan een nieuwe gebruiker behoort de Rollz Motion ontsmet te worden.

Het frame en de handgrepen kunt u schoonmaken met lauw water en een doek. Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een mild reinigingsmiddel. Vermijd overmatig contact van water met de bewegende delen, zoals de assen en scharnierpunten. Droog uw Rollz Motion goed na het wassen.

De wielen kunt u met een kunststof borstel en lauw water reinigen. (Let op! geen staalborstel gebruiken).

De bekleding van de Rollz Motion is afneembaar, verwijder voor het wassen altijd het binnenkussen.

Bekleding afnemen voor wassen.


- a. Trek met het klittenband de bekleding los van de zitting.
- b. Rits de zitting open en verwijder het binnenkussen. De bekleding kan nu gewassen worden.

LET OP: De bekleding nooit:

- Warmer wassen dan 30 °C
- Bleken
- Strijken
- Chemisch reinigen
- In de wasdroger drogen

Wat zit waar?

18. Zitkussen
19. Klittenband
20. Rits

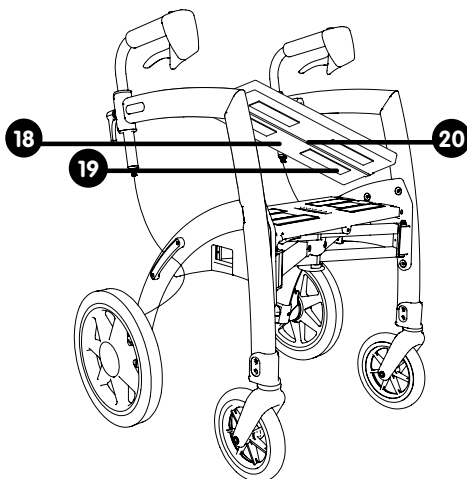

Figuur 13



Bekleding terugplaatsen na het wassen.

- a. Plaats het binnenkussen terug in de bekleding en rits de zitting dicht.
- b. Plaats de bekleding met binnenkussen terug op de zitting en bevestig deze met het klittenband.

Vervangen van onderdelen

Sommige onderdelen, zoals bijvoorbeeld de handgrepen en de zitting, zijn aan slijtage onderhevig en dienen tijdig vervangen te worden. Neem contact op met uw leverancier voor het vervangen van onderdelen.

LET OP: Gebruik alleen originele of door Rollz international goedgekeurde onderdelen.

Accessoires

De functionaliteit van de Rollz Motion is uit te breiden door het gebruik van accessoires. Gebruik alleen originele of door Rollz International BV goedgekeurde accessoires. Regelmatig worden nieuwe accessoires uitgebracht, raadpleeg hiervoor de website www.rollz.com of vraag hiernaar bij uw leverancier.

Van rollator naar rolstoel

Het Rollz rolstoelpakket is speciaal voor mensen die tijdens een wandeling even willen uitrusten. De Rollz Motion transformeert van rollator naar rolstoel in een handomdraai. En weer net zo eenvoudig terug.


De Rollz rolstoelfunctie is enkel bedoeld voor één persoon. Wanneer er meerdere personen tegelijkertijd op de rolstoelfunctie zitten, kan deze beschadigen. De Rollz rolstoelfunctie kan maximaal 125 Kg dragen.

De Rollz rolstoelfunctie is zeer makkelijk te gebruiken. De rolstoeltas kan al bij vertrek op de Rollz Motion worden bevestigd. Wanneer u wilt uitrusten, hoeft u alleen het pakket uit te klappen, de voetsteunen te plaatsen en de handgrepen om te draaien.

LET OP: de Rollz rolstoel is niet geschikt om personen tijdens vervoer met een rolstoeltaxi in te laten zitten.




Maximale zijwaartse hellingshoek

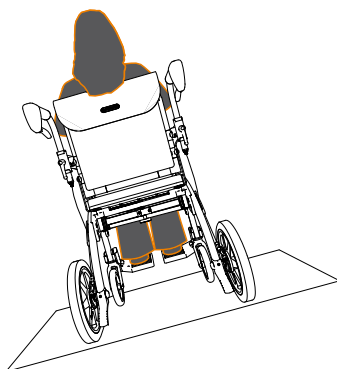


Max $\approx 15^\circ$

Wat zit waar


- 21. Geleiders tegen de zitting
- 22. Rode hendel
- 23. Rolstoeltas
- 24. Voetsteunhouders
- 25. Rugleuning
- 26. Armsteunen
- 27. Geleiders op het frame
- 28. Voetsteunen
- 29. Rolstoelfunctie/pakket
- 30. Vergrendelingsbouten

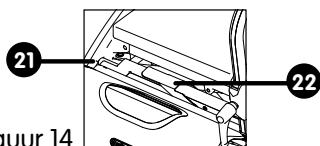


Figuur 14

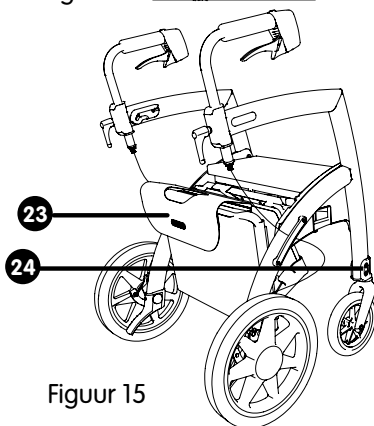

Figuur 15

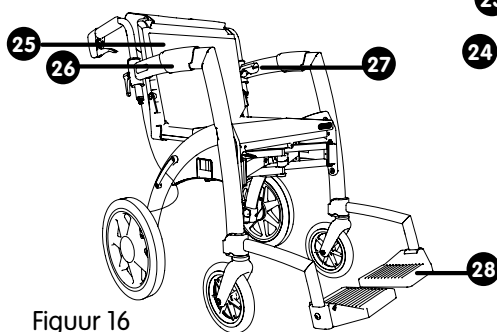

Figuur 16

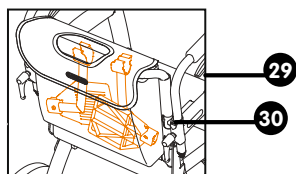


Figuur 17



Gebruik van het Rollz rolstoelpakket


Bevestigen Rollz rolstoelpakket

- Pak het Rollz rolstoelpakket en houd de tas naar u toe gericht. (Fig. 18).
- Breng met uw andere hand de rode hendel omhoog en plaats het Rollz rolstoelpakket in de geleiders tegen de zitting (Fig.20) .
- Duw de rode hendel zonder kracht omlaag. U kunt nu gewoon achter de Rollz Motion lopen (Fig. 19 en 21).

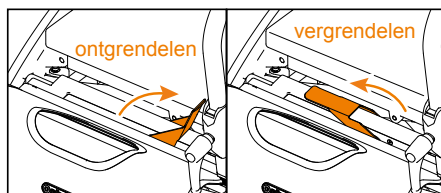


Figuur 20

Figuur 21

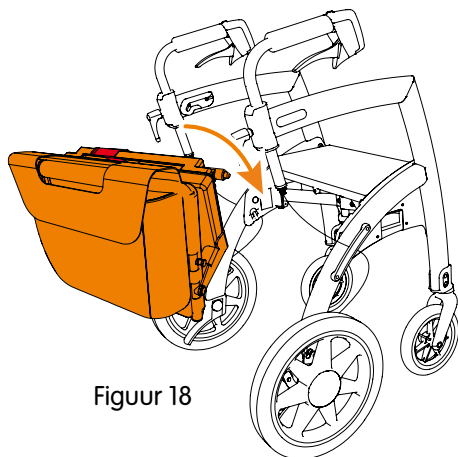

Figuur 18

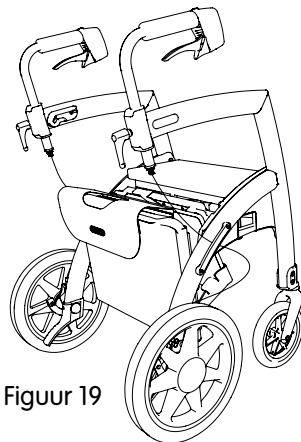

Figuur 19

LET OP: Als de rode hendel niet zonder kracht naar beneden gaat, neem het Rollz rolstoelpakket dan weer uit de geleiders tegen de zitting en probeer het nogmaals. Zet geen kracht, dit kan de Rollz Motion beschadigen. Mocht het na een aantal pogingen niet lukken, neem dan contact op met uw leverancier.



Uitklappen Rollz rolstoelpakket


Voor vertrek bevestigt u de rolstoeltas aan de Rollz Motion. Wanneer u wilt uitrusten, klapt u het rolstoelpakket uit en klikt hem in het frame.

- a. Pak de handgreep van het rolstoelpakket vast en trek de rugleuning naar boven tot hij niet verder gaat en richting de voorzijde tot halverwege het frame (Fig. 23). Trek vervolgens de rugleuning naar achter tot de vergrendelingsbouten in de geleiders op het frame klikken (Fig. 24).
- b. Draai de verstelgrepen van de handgrepen tegen de klok in los en draai de handgrepen om, totdat ze recht naar achteren wijzen. Stel de voor de duwer juiste hoogte in en draai de verstelgrepen met de klok mee weer vast (Fig. 25). (Zie afstellen/ houding).
- c. De voetsteunen bevinden zich in de rolstoeltas. De voetsteunen plaatst u aan de voorzijde van de Rollz Motion in de voetsteunhouders door ze vanaf de bovenzijde van de voetsteunhouders naar beneden te laten glijden (Fig. 26).
- d. De armsteunen bevinden zich in de rolstoeltas bij de voetsteunen. U plaatst deze op de plek waar uw armen rusten om het frame. Dit doet u door de armsteunen te sluiten met het klittenband (Fig. 27).


LET OP: Als de vergrendelingsbouten niet soepel in de geleiders op het frame glijden, duw de rugleuning dan weer naar voren tot halverwege het frame en probeer het opnieuw. Zet geen kracht wanneer het niet soepel gaat, hierdoor kan de Rollz rolstoelfunctie beschadigen. Mocht het na een aantal pogingen niet lukken, neem dan contact op met uw leverancier.

LET OP: Als de voetsteunen niet soepel over de voetsteunhouders glijden, zet dan geen kracht. Breng ze weer naar boven en probeer het opnieuw. Mocht het na een aantal pogingen niet lukken, neem dan contact op met uw leverancier.


LET OP: Controleer voordat u gaat zitten altijd of de vergrendelingsbouten correct in de geleiders geborgd zijn. Indien één van de vergrendelingsbouten niet is geborgd, gaat u dan niet zitten maar monteer de zitting opnieuw.

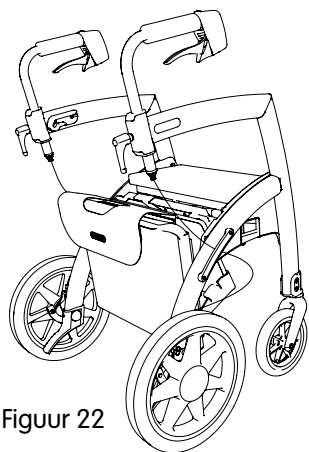


Figuur 22

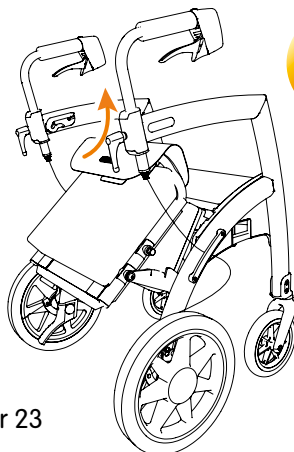


Figuur 23

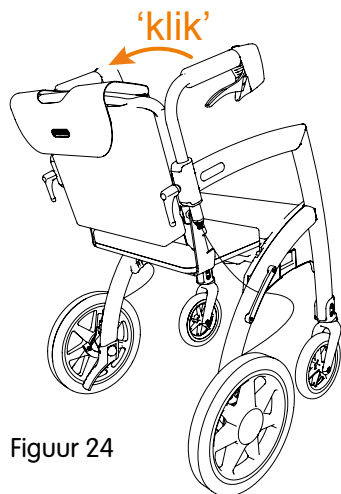


Figuur 24

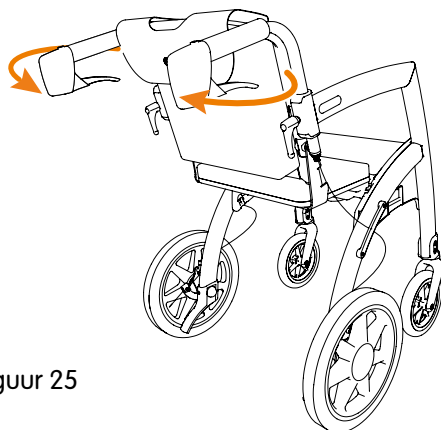

Figuur 25

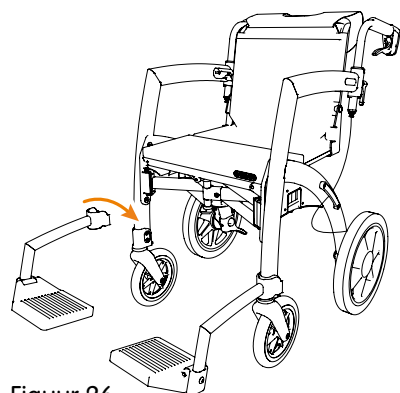

Figuur 26

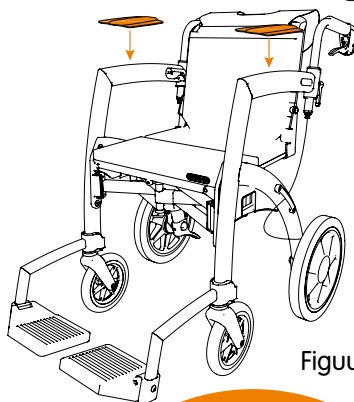

Figuur 27



Rugleuning Rollz rolstoel

Om optimaal zitcomfort te kunnen garanderen is het van belang de afstelbanden in de rugleuning van het Rollz rolstoelpakket aan de gebruiker aan te passen. Bij het eerste gebruik van de Rollz Motion met Rollz rolstoelpakket vragen wij u daarom de volgende stappen te doorlopen:

- a. Haal de voetsteunen uit de rolstoel tas en zorg dat de rugleuning van het Rollz rolstoelpakket is uitgeklaapt (zie: p.20). Vraag de gebruiker te gaan zitten.
- b. Trek het klittenband van de achterzijde van het Rollz rolstoelpakket los door de rolstoeltas vanaf de onderzijde omhoog te trekken.
- c. Verstel de banden door het klittenband los te trekken. Bevestig het klittenband zo dat het bekken van de gebruiker goed rechtop staat en de rugleuning de rug goed ondersteunt. In de meeste gevallen zullen de onderste banden losser afgesteld worden dan de bovenste twee banden.

Inklappen Rollz rolstoelpakket

- a. Trek de armsteunen los en plaats ze in de rolstoeltas.
- b. Laat de voetsteunen omhoog glijden tot ze uit de voetsteunhouders komen. Berg ze dan weer op in de tas van het Rollz rolstoelpakket.
- c. Draai de verstelgrepen van de handgrepen tegen de klok in los en draai de handgrepen om, totdat ze recht naar voren wijzen. Stel de voor u juiste hoogte in en draai de verstelgrepen met de klok mee weer vast. (Zie: afstellen/houding).
- d. Pak de handgreep van het rolstoelpakket vast en duw de rugleuning naar voren tot halverwege het frame. Duw vervolgens de rugleuning naar achter en naar beneden tot de rugleuning tegen de zitting aan zit.

Na het inklappen van de Rollz rolstoelfunctie kunt u deze tijdens het lopen gewoon op de Rollz Motion laten zitten. U loopt dan achter de Rollz Motion.

Loskoppelen Rollz rolstoelpakket

- a. Trek de rode hendel zonder kracht omhoog.
- b. Pak de handgreep van het Rollz rolstoelpakket en trek deze zonder kracht omhoog.
- c. Duw vervolgens de rode hendel naar beneden.



Technische specificaties

- Maximaal gewicht gebruiker : 125 kg
- Minimale en maximale lengte gebruiker: 1,60 m tot 1,90 m
- Gewicht product
 - o Rollz Motion: 10,6 kg
 - o Rollz rolstoelpakket: 3,7 kg
- Afmetingen:
 - o Uitgeklapt -> HxLxB: 86-102 x 63 x 63 cm
 - o Ingeklapt -> HxLxB: 86-102 x 63 x 29 cm
 - o Zitbreedte Rollz rolstoel: 420 mm
 - o Zitdiepte Rollz rolstoel: 400 mm

Contact

Omdat Rollz International altijd open staat voor verbetering, vragen wij u om uw mening. Dit kan gaan om het gebruikersgemak, de handleidingen of andere aspecten. Mail naar: info@rollz.com.

Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Rollz International:

Rollz International BV
Pedro de Medinalaan 63
1086 XP Amsterdam
The Netherlands
info@rollz.com



Garantie

Rollz International BV, gevestigd te Amsterdam (hierna: „Rollz“) geeft in haar hoedanigheid van fabrikant, garantie op de door haar geproduceerde Rollz Motion (hierna: „product“), onder de volgende bepalingen:

1. De garantietermijn is 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop. De garantietermijn wordt nooit verlengd, ook niet in geval van reparaties.
2. De garantie geeft recht op reparatie, uitdrukkelijk niet op ruilen of terugnane van een product.
3. Rollz draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het vervoer van en naar de winkelier waar u het product hebt gekocht (hierna: „leverancier“), echter slechts indien het een reparatie betreft die onder de garantie valt.
4. De garantie kan slechts worden ingeroepen indien u, samen met het defecte product, het volgende aan Rollz verstrekt: een kopie van de gedateerde aankoopbon en een duidelijke omschrijving van de klachten.
5. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus alleen worden ingeroepen door de eerste eigenaar.
6. De garantie doet niets af aan de rechten die u hebt op grond van de wet, bijvoorbeeld het recht om de leverancier aan te spreken op eventuele defecten.

In de volgende situaties geldt de garantie niet:

- Indien u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rollz of de leverancier zelf wijzigingen of reparaties hebt aangebracht of hebt laten anbrengen.
- Wanneer defecten zijn ontstaan door verwaarlozing of een ongeval en/of gebruik of onderhoud afwijkend van wat er in de handleiding wordt aangegeven.
- Beschadigingen of verwijderingen van het serienummer.
- Schade aan het product als gevolg van normale slijtage.

Belangrijk.

De garantietermijn van het product is 24 maanden vanaf de datum van aankoop. In geval van een defect, wordt u verzocht om naar de leverancier te gaan. Online kunt u op www.rollz.com uw product registreren. Noteer hierbij altijd het serienummer van de Rollz Motion. Dit nummer staat op de sticker, op het zitgedeelte onder het zitkussen.