

# rollz®

brengt u verder

## Gefeliciteerd met uw Rollz Flex dienblad

Gemaakt van duurzaam bamboe, geolied met hoogwaardige olie om het dienblad spatwaterdicht te maken. Het dienblad neemt u met een licht vochtig doekje af.

### Instructies


- 1** Zet de Rollz Flex eerst op de parkeerrem. Laat de voorzijde van het dienblad over het zitgedeelte zakken. ....



- 2** Laat dan de achterzijde over de zitting zakken. De achterzijde heeft gebogen steunen die over de zitting haken en ervoor zorgen dat het dienblad stabiel komt te liggen. ....



- 3** Vervolgens kunt u de Rollz Flex van de parkeerrem halen, en voorzichtig met uw Rollz Flex met dienblad gaan lopen. ....

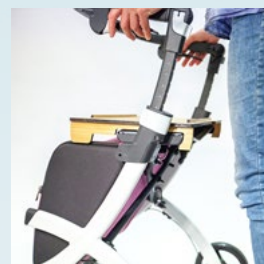

Pas op met hete vloeistoffen.  
Plaats of verwijder het dienblad alleen wanneer er geen voorwerpen op staan. Neem af zonder zeep.  
Geen kaarsen of ander voorwerp met een vlam erop zetten.