

rollz®

brengt u verder

Gefeliciteerd met uw Rollz Motion dienblad

Gemaakt van duurzaam bamboe, geolied met hoogwaardige olie om het dienblad spatwaterdicht te maken. Het dienblad neemt u met een licht vochtig doekje af.

Instructies

- 1** Zet de Rollz Motion eerst in de rollatorstand (handvaten naar voren) en op de parkeerrem. Houd het dienblad met het logo naar u toe.
- 2** Plaats het dienblad onder de handvaten en boven het horizontale deel van het frame.
- 3** Laat het dienblad zakken, zodat de inkepingen van het dienblad op het frame rusten. Zorg dat het dienblad niet te ver naar voren en niet te dicht naar u toe op het frame ligt. Oefen wat druk uit op het dienblad om u ervan te verzekeren dat het dienblad stabiel ligt.
- 4** Haal de Rollz Motion van de parkeerrem en u brengt gemakkelijk een glas drinken en een boek op het dienblad naar de woonkamer.



Pas op met hete vloeistoffen. Plaats of verwijder het dienblad alleen wanneer er geen voorwerpen op staan. Neem af zonder zeep. Geen kaarsen of ander voorwerp met een vlam erop zetten.

Let op: heeft u de handvaten op de laagste (min) of één na laagste (1) stand staan, dan is er helaas geen ruimte om het dienblad op het frame te plaatsen.

rollz motion