


Hoe vouwt u de Rollz Flex uit en weer in?

De allereerste keer is het even wennen. Openvouwen of openklappen vereist een handigheidje. Als u eenmaal weet hoe, vouwt u de Rollz Flex rollator makkelijk uit en weer in.

Openvouwen, openklappen of uitvouwen van de Rollz Flex rollator

Zo vouwt u hem open:

- Ga achter de dichtgevouwen Rollz Flex staan.
- Trek met de linkerhand het handvat aan de gazen zitting omhoog, scheef naar links (Stap 1 op de tekening).
- Trek met rechts tegelijk het frame wat naar buiten.
- Trek daarna het frame met beide handen verder naar buiten (Stap 2).
- Duw de zijkanten van de zitting naar beneden tot ze vast klikken, u hoort dan een zachte 'klik' (Stap 3).
- Klik de duwbeugel in het midden naar voren (Stap 4).
- Vergrendel hem door de vergrendelknop naar u toe te klikken (Stap 5).
- Nu is hij gebruiksklaar. Stel de duwbeugel op de juiste hoogte in.

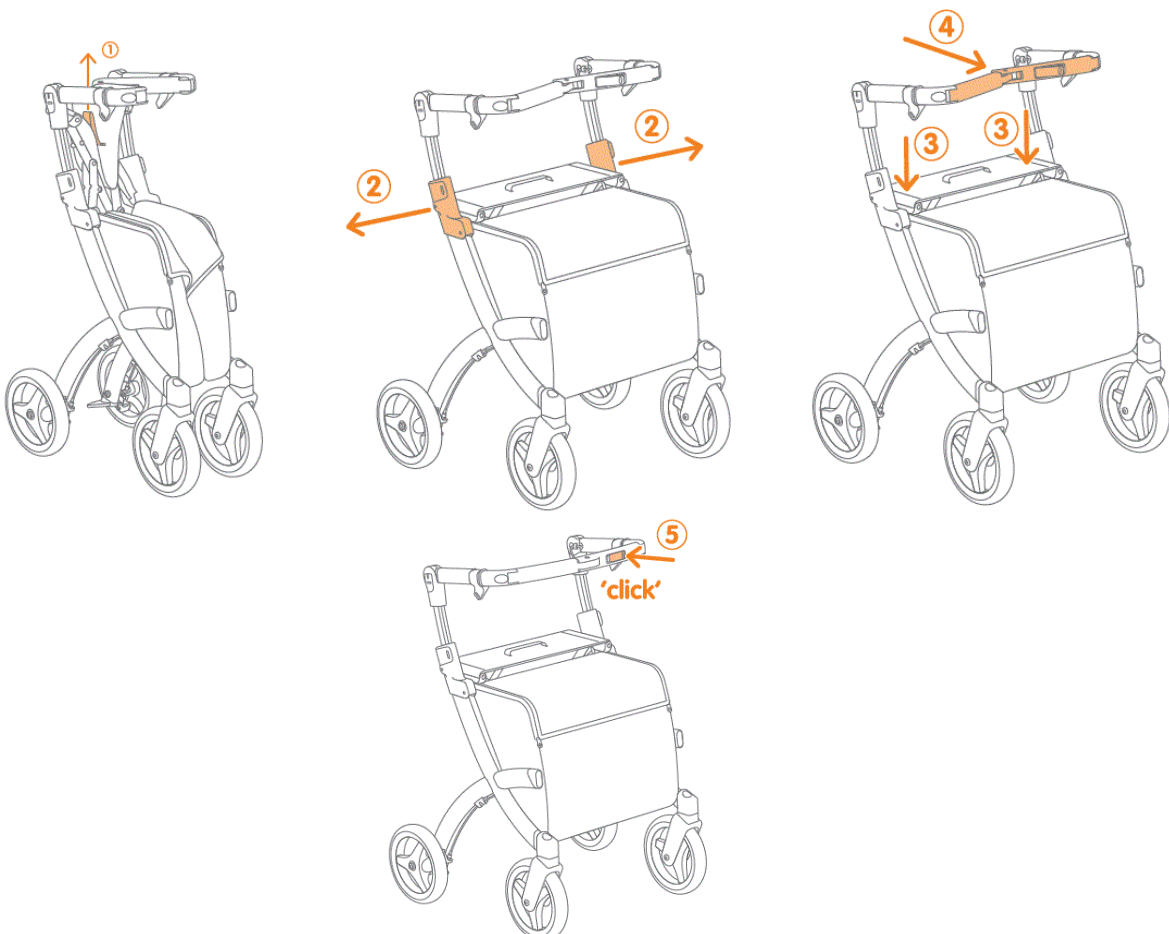


Opvouwen, inklappen of invouwen of van de Rollz Flex rollator

Zo vouwt u hem in:

- Haal eerst de boodschappen of andere spullen uit de tas, eventueel met binnentas en al (Stap 1).
- Ga achter de Rollz Flex staan.
- Zet de duwbeugel in de laagste stand om de rollator zo compact mogelijk in te klappen.
- Zet de duwbeugel in de rollatorstand, helemaal naar voren, zoals op de afbeelding.
- Trek het handvat in de zitting (aan het lint zit het vergrendelhaakje onder de zitting vast) recht omhoog. Nu klapt hij al een beetje in.
- Ontgrendel de duwbeugel, klik de vergrendelknop naar voren (Stap 3).
- Trek de duwbeugel in het midden licht naar u toe (Stap 4).
- Duw beide zijden van het frame helemaal naar elkaar toe.

Ingeklapt!

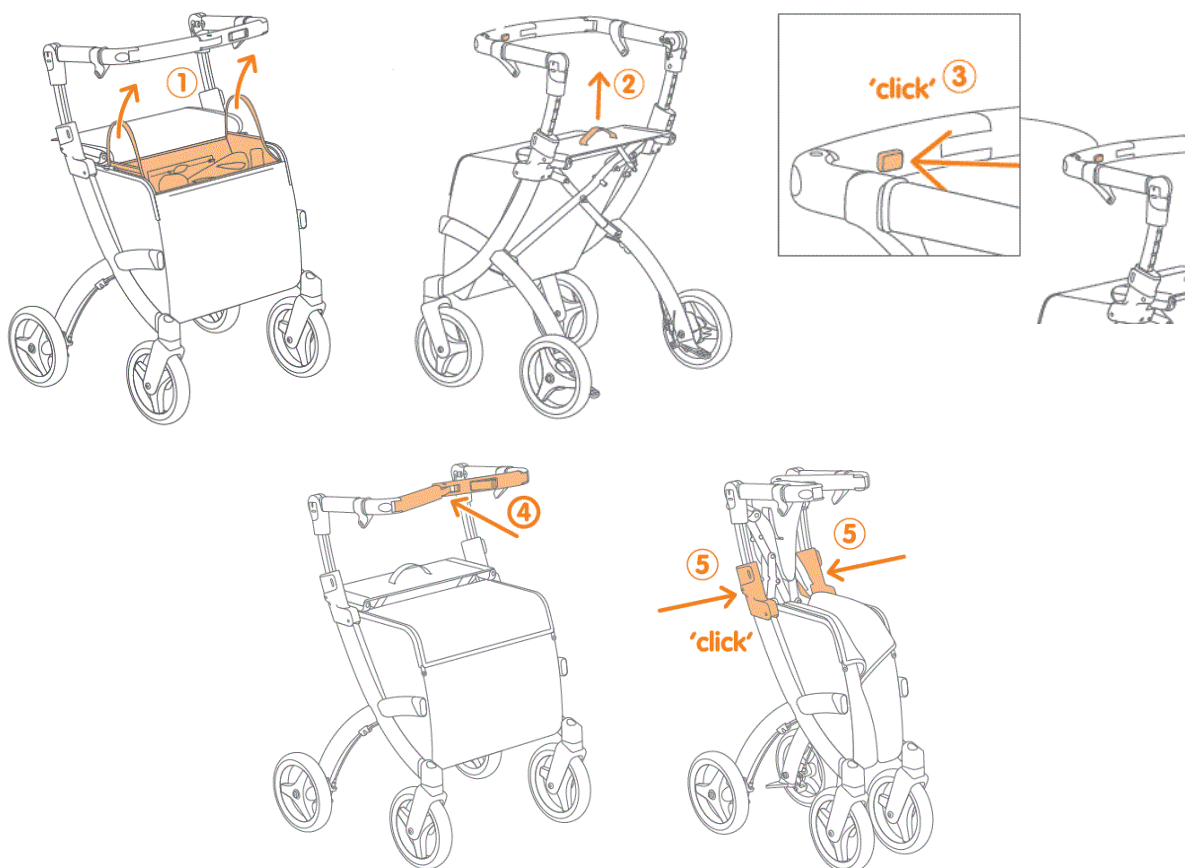

Het is even oefenen, we hopen dat het u snel lukt om dit soepel te doen. U kunt ook op [de demovideo](#) zien hoe het uitklappen gaat. Het is even oefenen, we hopen dat het u snel lukt om dit soepel te doen.

